

Anvisning for utbytte av SRAB amalgamutskiller

- ✓ Originalemballasjen **må ikke kastes**, den brukte utskilleren skal returneres i denne.
- ✓ Steng vannet til uniten.
- ✓ Stopp sugemotoren
- ✓ Hell litt på den slik at **litt** av vannet i den renner ut i avløpet.
- ✓ Ta av én slange av gangen og koble til den nye utskilleren slik at ikke ut og inn forbyttes. Ved å vri og løfte samtidig løsner slangene.
- ✓ Pass på at **inn** og **ut** er riktig koblet, begge er godt merket på utskilleren.
- ✓ Fyll ut deklarasjonsskjema for spesialavfall. **NB: ved mangelfull utfylling vil det bli fakturert ekstragebyr pålydende kr 350,- eks mva.**
- ✓ Plasser den brukte utskilleren i originalemballasjen med ferdig utfylt deklarasjonsskjema og send det til:

Dental Miljø Teknikk AS
Tomtaveien 9
1449 Drøbak.

- ✓ Det er også plass til løsamalgam i forpakningen, påse at det er forsvarlig pakket og at det står trygt slik at det tåler transport.
- ✓ Veiledning for utfylling av deklarasjonsskjema finner du på:
www.dental-teknikk.com

Mvh

Dental Miljø Teknikk AS